

Der mobile dritte Arm

Christian Wörz, Parkstrasse 43, 82131 Gauting
Tel.: 089/89398076 Fax.: 089/89398077
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hilfsmitteln



Gebrauchsanweisung für den „mobilen dritten“ Arm

CE

Durch Hochziehen des **Sauger-Hebels** auf einer glatten, sauberen, fett- und ölfreien Oberfläche wird der „Mobile dritte Arm“ gebrauchsfertig fixiert. (Glasoberflächen oder jede andere glatte Kunststoffoberfläche bieten sich am besten an.)

Zentralschraube lösen, bis sich der Arm mit geringem Kraftaufwand bewegen lässt, und Arm inklusive **Bajonettverschluss** in senkrechte Position bringen.

Arm durch Festdrehen der Schraube fixieren.

Den Einsatz mit leichtem Druck und durch Verdrehen nach links bis zum Einrasten im Bajonettverschluss befestigen.

Zentralschraube nur leicht lösen, und Einsatz in die gewünschte Position bringen.

Zentralschraube wieder festdrehen. (Objekt fixieren!)

Nach Benutzung den Arm wieder in senkrechte Position bringen und den Einsatz mit leichtem Druck und durch verdrehen nach rechts wieder aus dem Bajonettverschluss lösen.


Einsatz reinigen.

Arm wieder zusammenklappen.

Arm durch umlegen des Sauger-Hebels nach hinten, wieder von der Oberfläche lösen.

(Bei sehr glatten Oberflächen, kann es notwendig sein, mit dem Finger unter den Gummi zu greifen um das Vakuum vollständig zu lösen.)

Viel Spaß beim Ausprobieren.

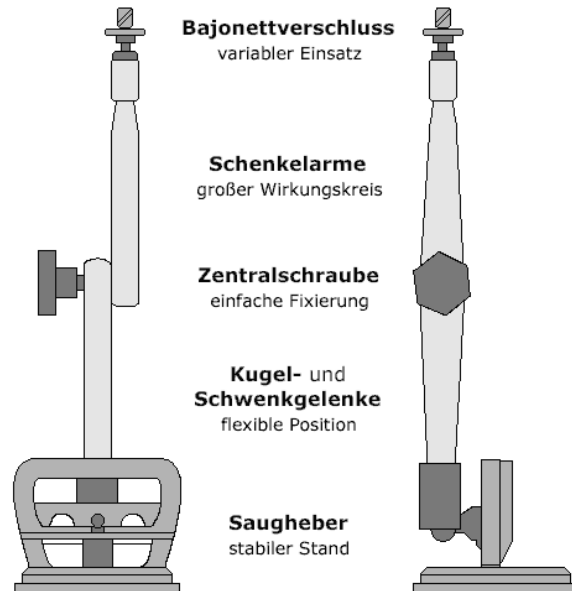

Technische Daten

Gewicht: 1227 g
Abmaße: 15 x 15 x 25 cm [stehend geschlossen]
Reichweite: Halbkugel 40 cm Radius [ohne Einsatz]
Material: Vakuumsauger und Schwenkarme aus Aluguss, Handrad aus Kunststoff
Öldrucksystem: medizinisches Weißöl [geschlossenes System]

Die Garantie für den MOBARM (Mobilen dritten Arm) beträgt bei sachgemäßem Gebrauch 2 Jahre.